




Guía Rápida Askina® para el manejo de heridas

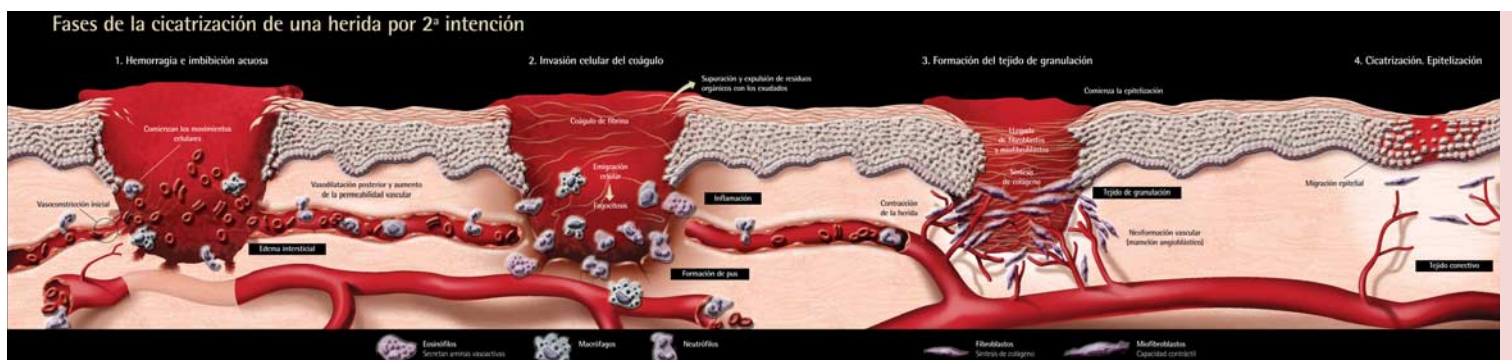

Protocolo de Manejo de Heridas

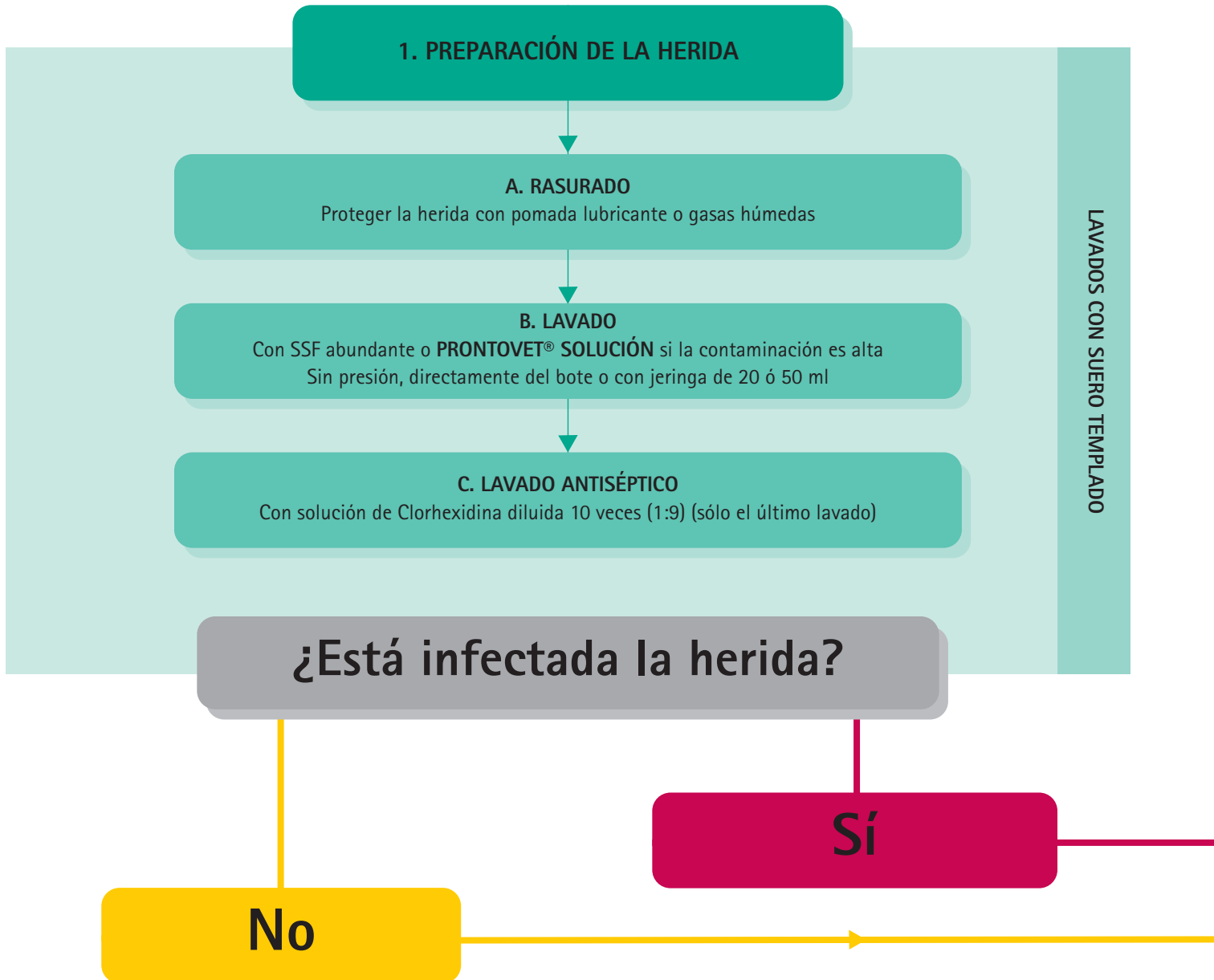

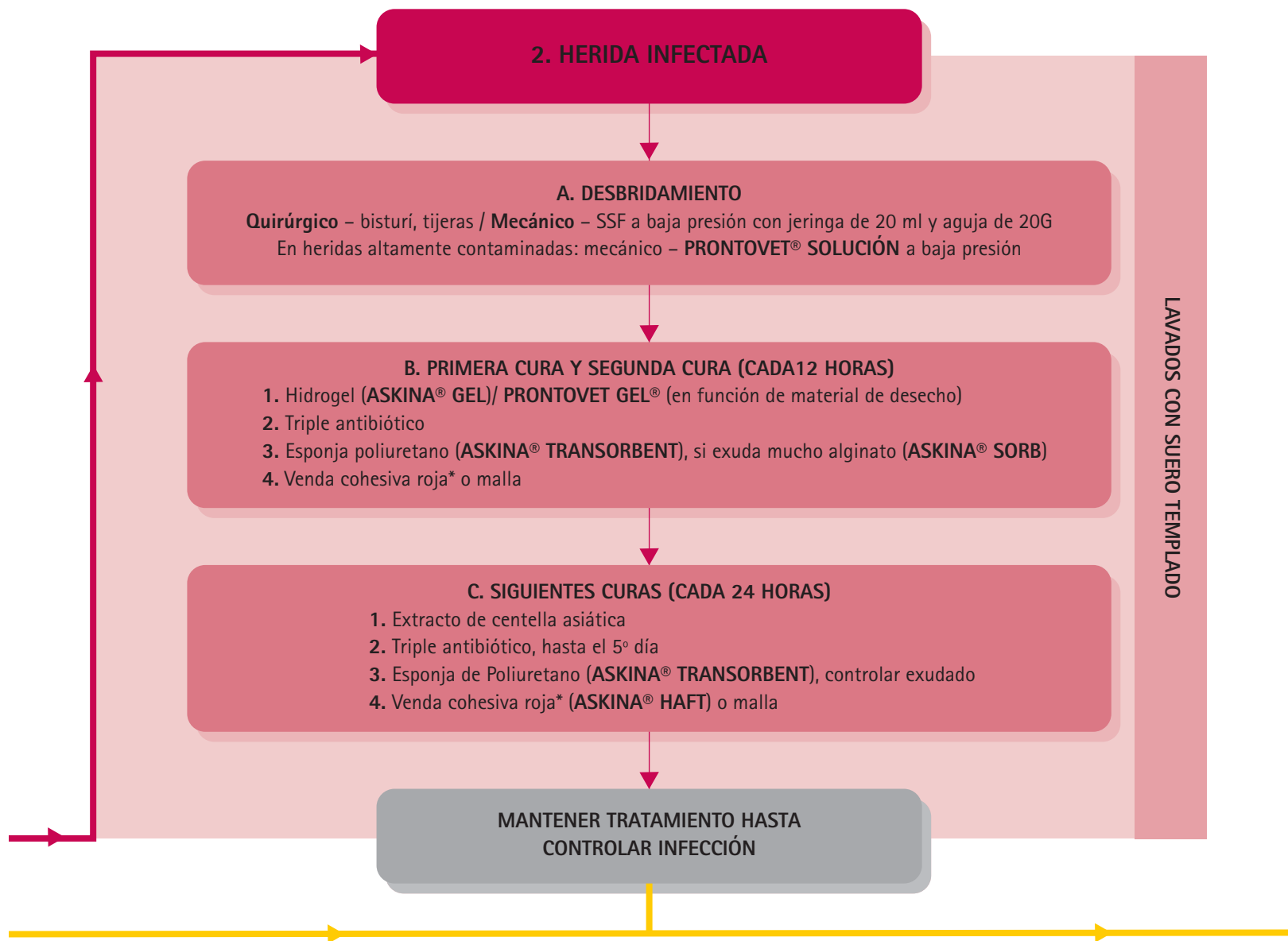

Askina®

*Código de colores para diferenciar externamente si se trata de una herida infectada o no.

‡ Protocolo elaborado en colaboración con el Dr. Joaquín Sopena (Universidad CEU Cardenal Herrera, Valencia)



3. HERIDA CONTAMINADA O NO INFECTADA

A. LIMPIEZA PROFUNDA Y DESBRIDAMIENTO
Mecánico – SSF a presión con jeringa de 20 ml y aguja de 20G
Quirúrgico – bisturí, tijeras


¿PUEDE SUTURARSE?**No****Sí****ESCISIÓN Y
SUTURA DIRECTA****Sí****¿PUEDE
SUTURARSE?****No**

LA HERIDA NO
EVOLUCIONA TRAS DOS
CURAS CONSECUTIVAS

**CICATRIZACIÓN POR
SEGUNDA INTENCIÓN****CIRUGÍA PLÁSTICA
RECONSTRUCTIVA****REPLANTEAR
TRATAMIENTO**

- CURAS**
1. Extracto de centella asiática
 2. Malla cicatrizante / aloe vera / miel
 3. Esponja de poliuretano (**ASKINA® TRANSORBENT**), si exuda poco hidrocoloide (**ASKINA® BIOFILM TRANSPARENT**)
 4. Venda cohesiva amarilla* (**ASKINA® HAFT**) o malla

Cura a las 24 horas (primera)
Cura a las 72 horas (segunda)
Curas cada 48 – 96 horas en función de exudación

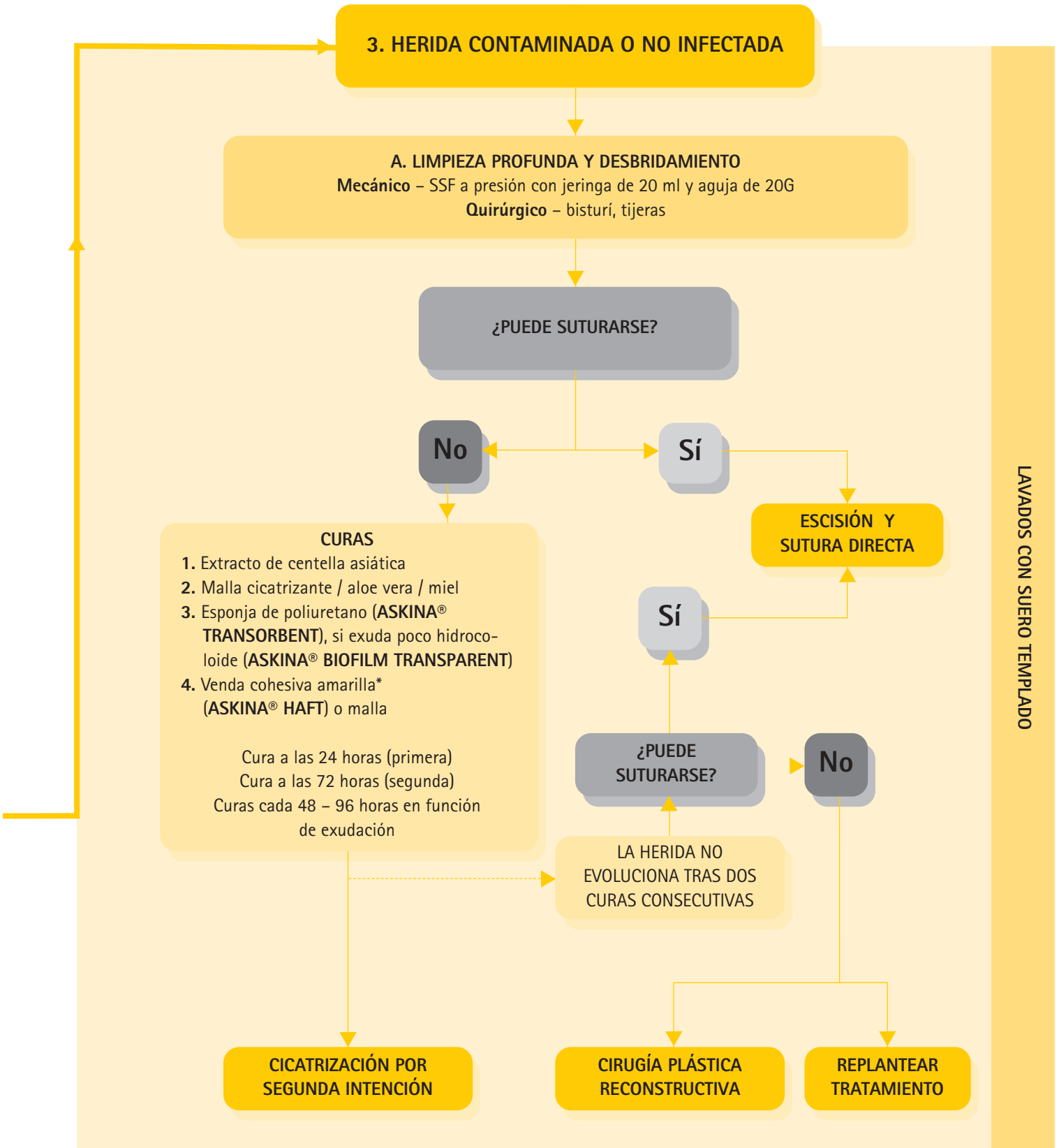

Gama Askina® y ProntoVet

La solución completa para el cuidado de heridas



ProntoVet Solución

Solución de irrigación para el lavado y descontaminación de heridas

- Alta eficacia limpiadora
- Elimina los malos olores
- Estimula la cicatrización
- Contiene polihexanida y betaína
- Penetra y disuelve el biofilm bacteriano y las coberturas de fibrina
- Facilita el cambio de apósitos resecos o pegados a la herida.



ProntoVet Gel

Gel para la limpieza y descontaminación de heridas

- Permanece en la herida
- Aplicable de forma directa, mediante gasas empapadas o con jeringas en el caso de fístulas o lesiones cavitadas
- Limpia y descontamina la herida
- Crea las condiciones óptimas para la correcta cicatrización.



Askina® Gel

Hidrogel incoloro, translúcido y estéril

- Desbridante autolítico de lesiones necróticas
- Mantiene la humedad en el entorno de la lesión
- Especialmente indicado en lesiones necróticas

Indicaciones: necrosis, esfacelos y heridas ligeramente exudativas.



Askina® Pad

Apósito no adherente estéril

- Apósito de algodón estéril altamente absorbente
- Recubrimiento de teflón antiadherente

Indicaciones: Heridas ligeramente exudativas.



Askina® Sorb

Apósito de alginato cálcico e hidrocoloide

- Absorción del exudado
- Estéril, no adhesivo
- Asociar con Askina® Transorbent® como apósito secundario de retención

Indicaciones: heridas altamente exudativas.



Askina® Biofilm® Transparent

Apósito hidrocoloide autoadhesivo estéril, transparente y extrafino

- Permeable al intercambio gaseoso e impermeable a las bacterias y al agua
- No se adhiere a la lesión
- Extrafino y moldeable

Indicaciones: heridas ligeramente exudativas en las que sea necesaria una visualización directa.



Askina® Transorbent®

Apósito hidrocélular de poliuretano estéril y flexible

- Impermeable al agua y microorganismos y permeable al vapor de agua e intercambio gaseoso
- Alta capacidad de absorción: retira el exceso de exudado de la herida
- La capa central de espuma de poliéster absorbe exudados evitando la formación de costras
- No se adhiere a la herida
- Permanencia hasta 7 días

Indicaciones: heridas de moderada o alta exudación.




Askina® Haft Color

Venda elástica cohesiva hipoalergénica

- 75% de elasticidad longitudinal
- 40 % algodón y 60 % poliamida
- Alta adhesividad
- Autoclavable.

Nivel de exudado

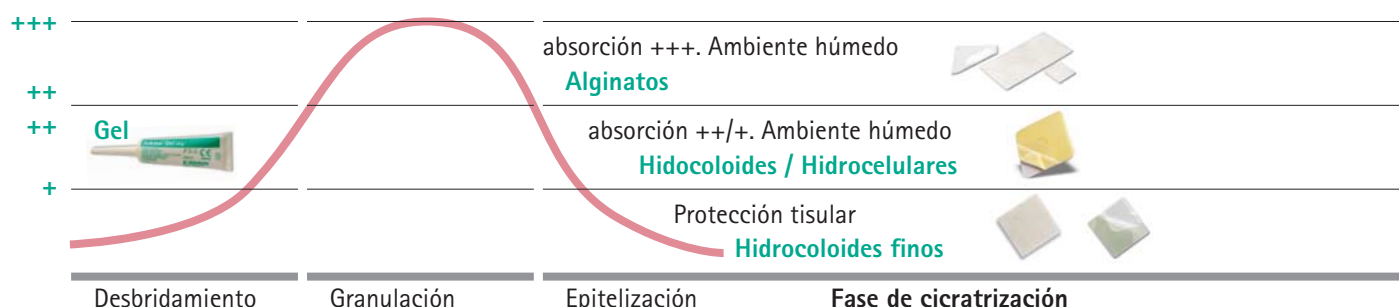

Producto	Color	Referencia	Medidas	Unidad de venta
ProntoVet				
■ ProntoVet Solución		400601	350 ml	10
■ ProntoVet Gel		400600	30 ml	20
Askina® Gel		001419SES	15 gr	5
Askina® Transorbent®		0072783R	5x7 cm	3
		0072787U	10x10 cm	3
		0072793V	15x15 cm	3
		0072791W	20x20 cm	5
Askina® Biofilm® Transparent		F72093	5x20 cm	3
		F72094	10x10 cm	3
		F72096	15x15 cm	3
		F72092	20x20 cm	5
Askina® Sorb		2109S	6x6 cm	3
		2107S	10x10 cm	3
		2108S	15x15 cm	3
Askina® Pad		9024018	5x5 cm	100
		9024034	10x10 cm	100
		9024042	10x20 cm	100
Askina® Haft Color	Amarillo	9058257	8 cmx20 m	1
	Amarillo	9058249	6 cmx20 m	1
	Rosa	9058230	8 cmx20 m	1
	Rosa	9058222	6 cmx20 m	1
	Azul	9058214	8 cmx20 m	1
	Azul	9058203	6 cmx20 m	1